



Протокол сверления для сверхкоротких имплантатов RESPECT ULTRASHORT (US)

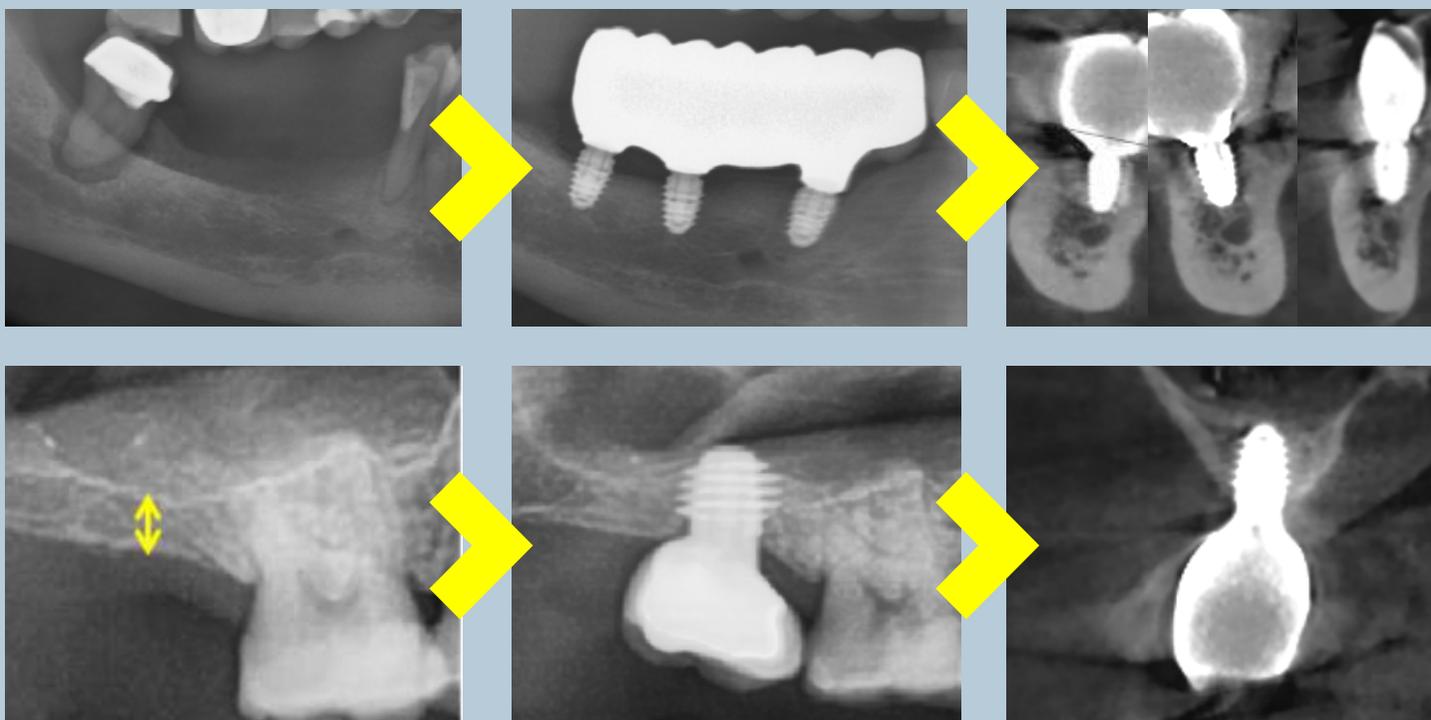

Протокол сверления для коротких имплантатов РЕСПЕКТ УЛЬТРАШОТ

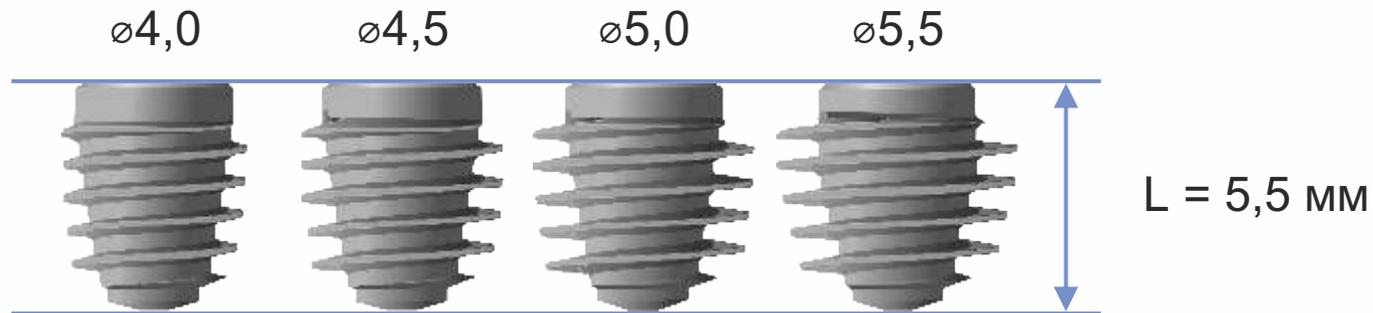

$\varnothing 2,0$ $\varnothing 3,3$



Для установки сверхкоротких имплантатов следует использовать специальные начальные короткие сверла:



- Первоначальное сверление проводится специальными короткими сверлами длиной 5,5 мм (диаметр 2.0 и 3.3 мм).
- При необходимости дальнейшее расширение проводится обычными сверлами.




ø4,0




ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,0

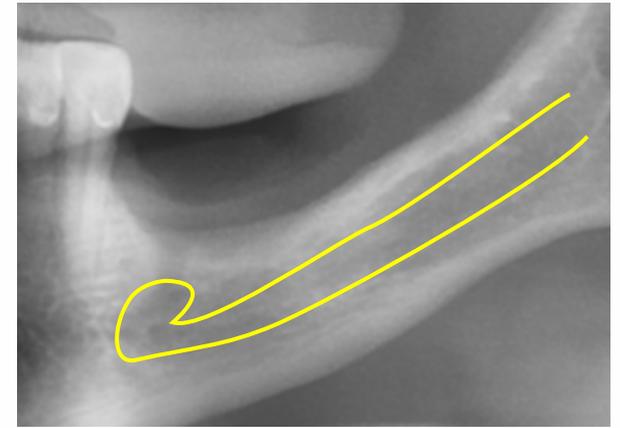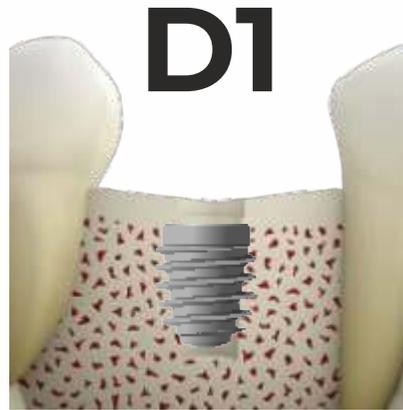

ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,0

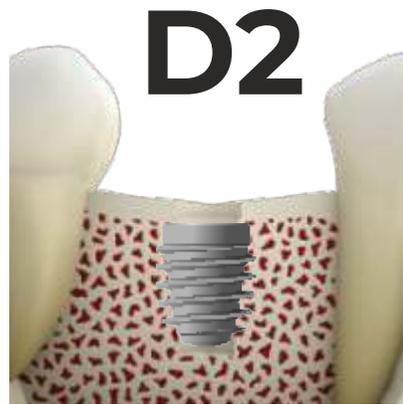



ø2,0 ø3,3 ø3,8

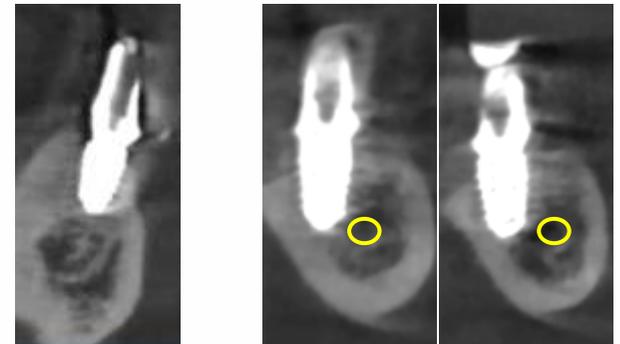

ø4,5




ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,3 ø4,4

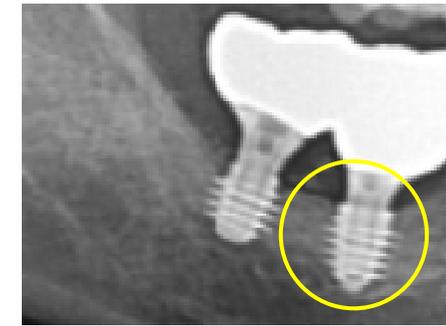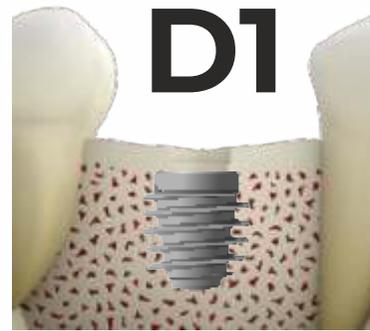



ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,3




ø2,0 ø3,3 ø3,8


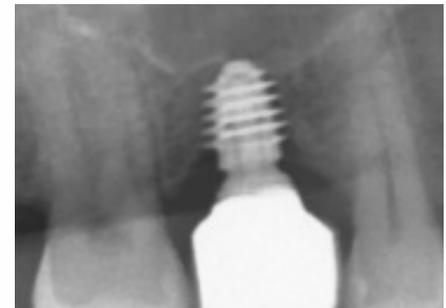


ø2,0 ø3,3 ø3,8

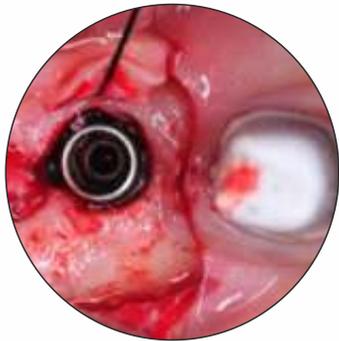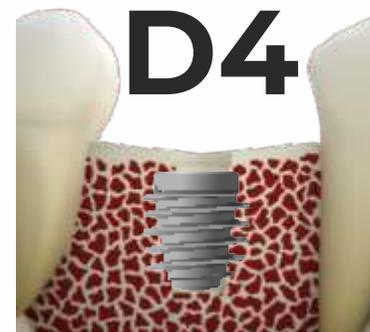


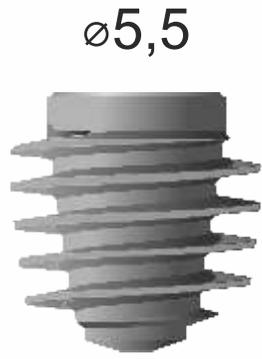

ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,3 ø4,8 ø5,7

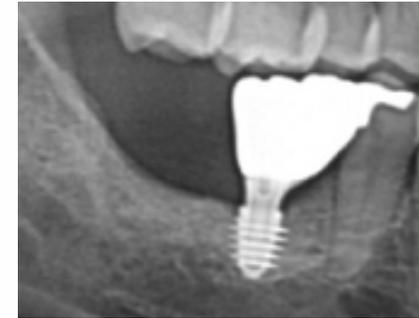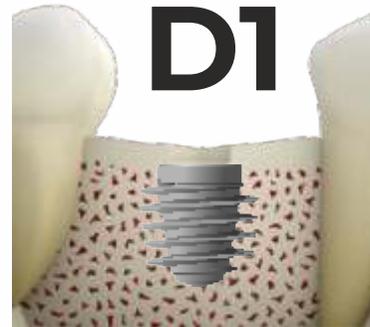


ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,3 ø4,8

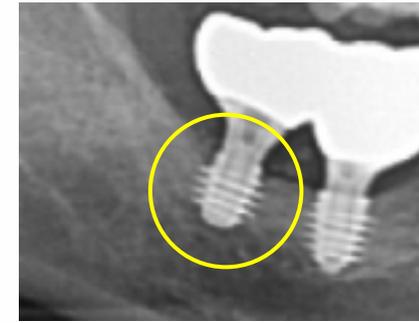


ø2,0 ø3,3 ø3,8



ø2,0 ø3,3 ø3,8

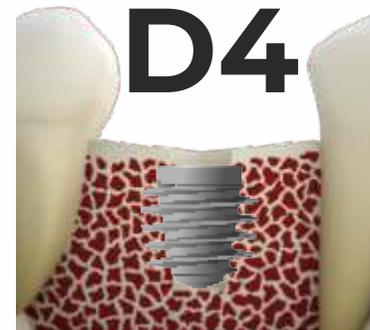


ø5,5

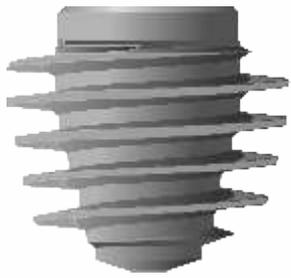

ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,0




D3

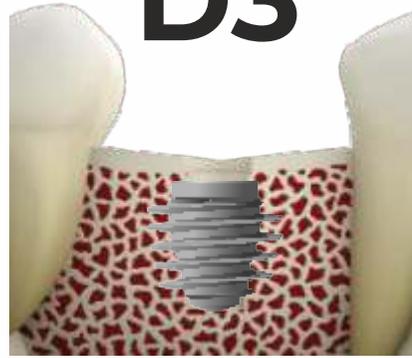

ø2,0 ø3,3 ø3,8



D4

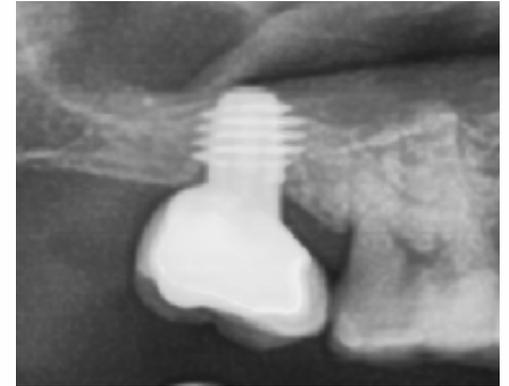


Рекомендации по выбору диаметра имплантата в зависимости от типа костной ткани

ø4,0




ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,0

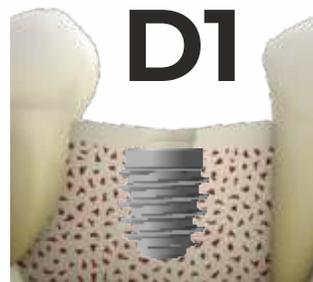

ø4,5




ø2,0 ø3,3 ø3,8 ø4,0

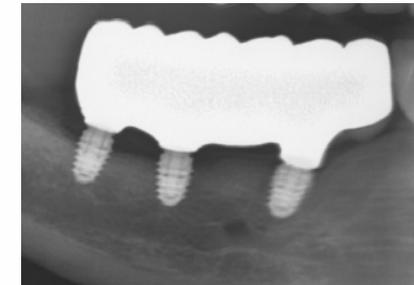

ø5,0



ø2,0 ø3,3 ø3,8

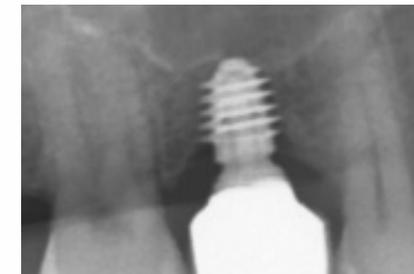

ø5,5



ø2,0 ø3,3 ø3,8



Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата РЕСПЕКТ

Специальными сверлами длиной 5,5 мм

2005M
3305M

Имплантат


Высота кости 3-4 мм

Формируем ложе под имплантат сверлами не доходя 1 мм до дна гайморовой пазухи (на 2/3 спец сверел L5,5)


Подламываем костный островок остеотомом ImprOst Ø3,8 на 2 мм от первоначальной глубины

Вводим слегка отжатый сгусток Clot-PRF, продвигаем его остеотомом

Вводим имплантат RESPECT US Ø 4,5-5,0 со скоростью 20 об/мин и торком 40-50 Нсм

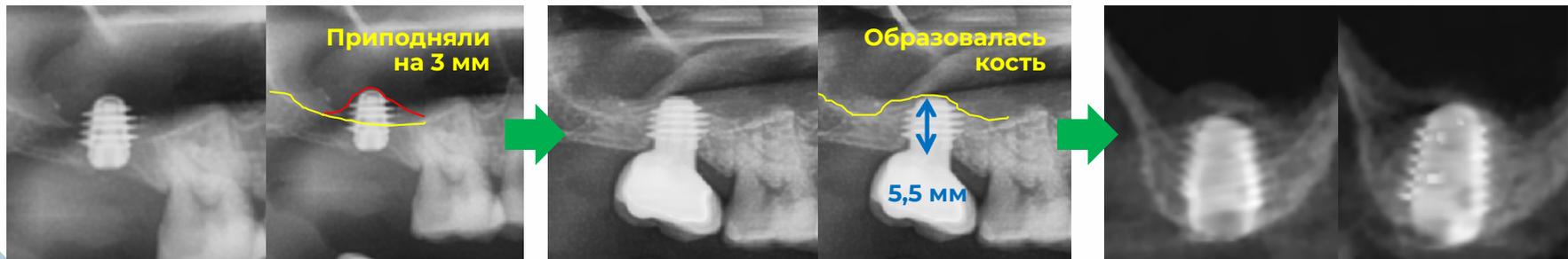


Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата РЕСПЕКТ

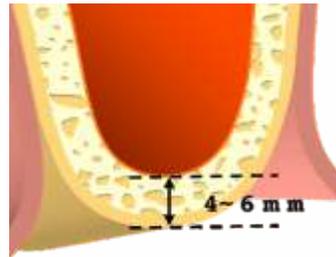



Сверлами из набора РЕСПЕКТ длиной 7 мм




Ø2,0 L= 7мм Ø2,8 L= 7мм Ø3,3 L= 7мм

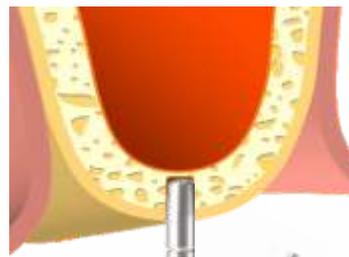

остеотом ImprOst Ø3,8

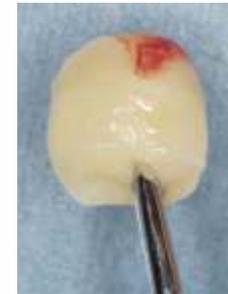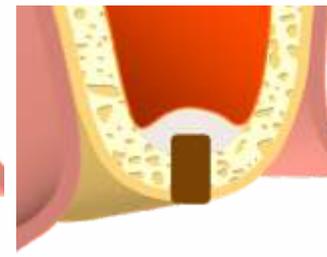

Сгусток Clot-PRF (стеклянная пробирка 1300 об/мин – 8 мин)

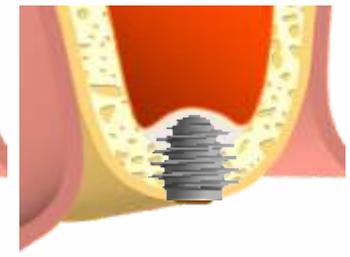

имплантат Respect Ultrashort Ø 4,5-5,0 и длиной 5,5 мм




Высота кости 3-4 мм




Формируем ложе под имплантат сверлами не доходя 1 мм до дна гайморовой пазухи. Сверло длиной 7 мм должно погружаться чуть меньше половины.



Подламываем костный островок остеотомом ImprOst Ø3,8 на 2 мм от первоначальной глубины

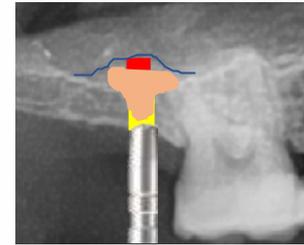






Вводим слегка отжатый сгусток Clot-PRF, продвигаем его остеотомом

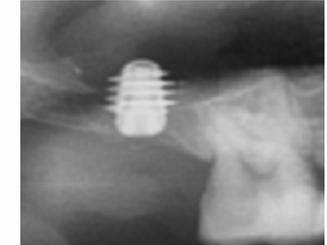

Вводим имплантат Respect Ultrashort Ø 4,5-5,0 со скоростью 20 об/мин и торком 40-50 Нсм



Проведение закрытого синус-лифтинга при установке короткого имплантата РЕСПЕКТ

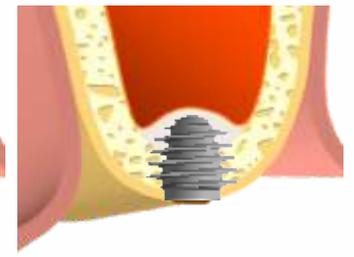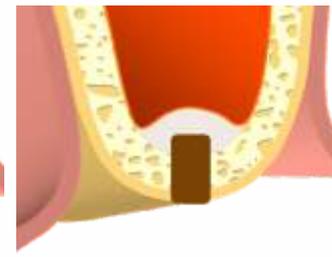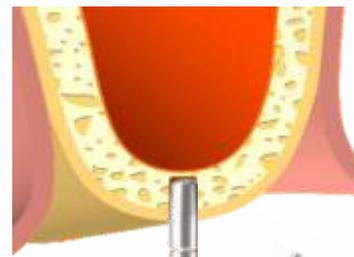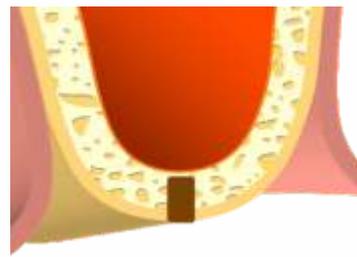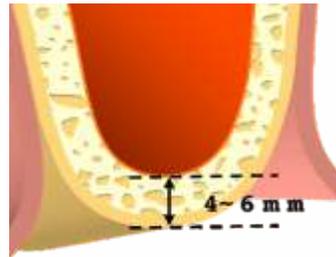

Сверлами из стартового набора РЕСПЕКТ




Ø2,0

Ø2,8

Ø3,3



остеотом ImprOst Ø3,8

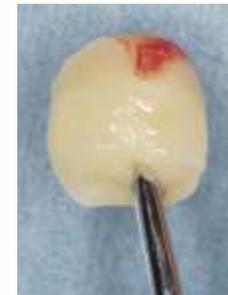

Сгусток Clot-PRF (стеклянная пробирка 1300 об/мин – 8 мин)




имплантат Respect Ultrashort Ø 4,5-5,0 и длиной 5,5 мм




Высота кости 3-4 мм




Формируем ложе под имплантат сверлами не доходя 1 мм до дна гайморовой пазухи. Погружаем только конусный кончик сверла.

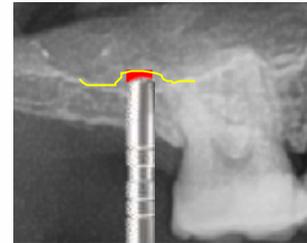

Подламываем костный островок остеотомом ImprOst Ø3,8 на 2 мм от первоначальной глубины

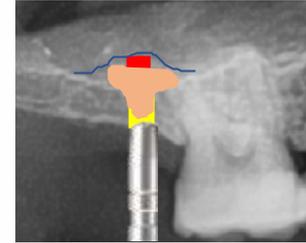


Вводим слегка отжатый сгусток Clot-PRF, продвигаем его остеотомом

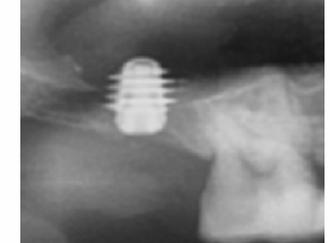

Вводим имплантат Respect Ultrashort Ø 4,5-5,0 со скоростью 20 об/мин и торком 40-50 Нсм



Видео №1
Установка коротких
имплантатов
с применением
свёрел 7 мм
из полного набора
Респект

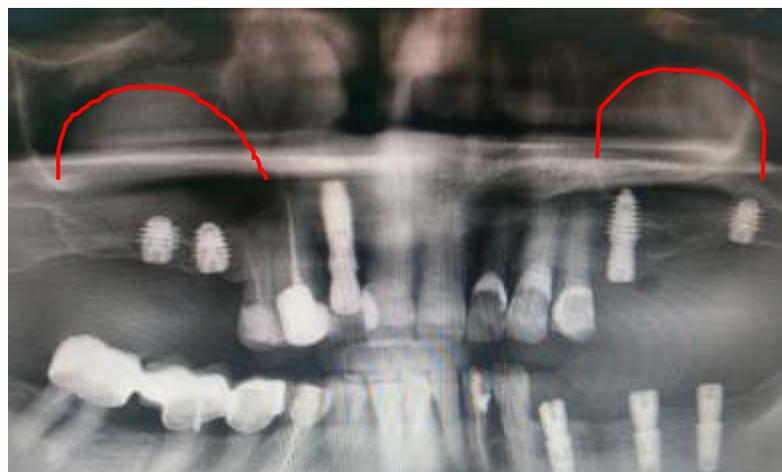

Видео №2
Установка коротких
имплантатов
с применением
длинных свёрел
из стартового набора
Респект

