

Набор для отбеливания Denu Sprakle

Комплектация набора:

1. Стеклонная емкость с отбеливающим гелем 1,5ml x 10 шт.
2. Активатор геля (H₂O₂, 35% перекись водорода) 10 ампул
3. Одноразовый шпатель
4. Одноразовые браши

7 шагов к белоснежной улыбке:

Шаг 1: Установите ретрактор для губ в полость рта пациента язычком к спинке языка. Поместите ватные валики по обеим сторонам от уздечки верхней и нижней губы.



Шаг 2: После подсушивания десны нанесите на нее защитный слой жидкого коффердама шириной 3-4мм и засветите его полимеризационной лампой (20 сек).



Шаг 3: В одну стеклянную емкость с отбеливающим гелем добавьте одну ампулу с активатором (H₂O₂). Тщательно перемешайте шпателем.



Шаг 4: Первый цикл: используя брашик, нанесите получившуюся массу (шаг 3) на зубы пациента слоем 2-3мм на 30 минут. Рекомендуется усилить воздействие геля лампой.



Шаг 5: Используя брашики или ватные тампоны, удалите гель с поверхности зубов. Не промывать!



Шаг 6: Второй цикл: повторите манипуляции третьего и четвертого шагов еще на 30 минут. Можно усилить воздействие геля лампой.



Шаг 7: Используя брашики или ватные тампоны, удалите гель с поверхности зубов. Удалите коффердам. Промойте зубы и полость рта пациента теплой водой.



Отбеливающий гель и активатор (H₂O₂) необходимо хранить в холодильнике.
Хранение в морозильной камере запрещено!